

beurer_{medical}

guida rapida

GL 48
IT

IVD MD



GL 48 / LD 04

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No. 168,
PuTuoShan Road, New District, Suzhou 215153, China

EC REP

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague, The Netherlands

CE 0483 / CE



CE 0197

Prima del primo utilizzo



Prima di utilizzare il misuratore di glicemia per la prima volta, leggere con attenzione le istruzioni per l'uso. Controllare l'unità di misura come indicato nelle istruzioni per l'uso.


Pericolo di infezione



Il misuratore e gli accessori possono entrare in contatto con sangue umano e rappresentano pertanto una possibile fonte di infezione.

- Non condividere mai l'apparecchio di misurazione, la penna pungidito e i relativi accessori con altre persone.
- Per l'utilizzo del sistema di misurazione su diverse persone rispettare le norme igieniche comunemente utilizzate.
- Utilizzare una nuova lancetta sterile per ogni prelievo di campione di sangue.
- Prima del prelievo del campione di sangue, lavare le mani con acqua calda e sapone e asciugarle.

Preparazione della penna pungidito e dell'apparecchio

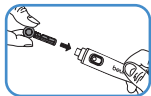

Inserimento della lancetta

Svitare il cappuccio della penna pungidito. Inserire la lancetta sterile nella penna pungidito.

Fissare la lancetta sterile sullo stelo e svitare il disco di protezione. Conservare il disco di protezione. Riavvitare il cappuccio sulla penna pungidito. Ruotare la parte superiore mobile del cappuccio finché la profondità desiderata non è visibile. Tirare indietro il dispositivo di bloccaggio fino all'innesto.




Inserimento della striscia reattiva

Inserire la striscia reattiva nell'apparecchio con i contatti in avanti come indicato dalla freccia.

Attendere brevemente finché, dopo una breve visualizzazione della schermata di avvio, il simbolo della goccia di sangue non lampeggia sul display.

Prelievo del campione di sangue

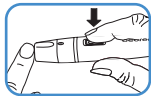

Puntura

Appoggiare la penna pungidito leggermente a lato del centro del polpastrello.
Premere il pulsante di rilascio.

La goccia di sangue prelevata deve:

- essere a forma di goccia e non si deve spargere
- essere della dimensione minima di 1,2 mm (dimensione originale ●).

Valutazione dei valori misurati critici


Lo	Ipoglicemia < 20 mg/dL	Necessario un trattamento immediato da parte di un medico.
65 mg/dL	Glicemia bassa < 70 mg/dL	Fare spuntini tra i pasti principali. Seguire le indicazioni del medico.
150 mg/dL	Glicemia alta a digiuno > 100 mg/dL 2 ore dopo il pasto > 140 mg/dL	Rivolgersi al proprio medico.
300 mg/dL	Glicemia alta, a volte chetoni > 240 mg/dL	Si consiglia un test dei chetoni. Consultandosi con il proprio medico.

HI

Glicemia molto alta
> 630 mg/dL

Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva. In caso di medesimo risultato consultare subito il medico.

Messaggi sul display

LP	Batterie scariche	Sostituire tutte le batterie.
h_t / L_t	Temperatura oltre gli intervalli consentiti	Ripetere il test con una nuova striscia in caso di temperatura compresa tra +20 °C e +26 °C.
Err 	Striscia reattiva usata, sporca o scaduta	Inserire una striscia nuova non scaduta e ripetere la misurazione.
Err001	Errore di sistema	Rimuovere le batterie. Reinserire le batterie. Se il problema persiste, rivolgersi all'Assistenza clienti.
Err002	Campione su striscia insufficiente	Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva.
Err004	Anomalia del processo di misurazione	Prima di misurare la glicemia, controllare i passaggi necessari e ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva.