

beurer
— medical

kurzanleitung

Codefree

mg/dL

GL34

D



IVD

CE 0483



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: 08006645222 • E-Mail: kd@beurer.de • www.beurer-medical.de

Warn- und Sicherheitshinweise



Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie vor der ersten Blutzucker-Messung unbedingt die ausführliche Gebrauchsanweisung.




Infektionsgefahr

Das Messgerät und das Zubehör können mit menschlichem Blut in Kontakt kommen und stellen darum eine mögliche Infektionsquelle dar.

- Benutzen Sie das Messgerät, die Stechhilfe und das Zubehör nie gemeinsam mit anderen Personen.
- Beachten Sie bei Verwendung des Messsystems an unterschiedlichen Personen die allgemein gültigen Hygienevorschriften.
- Verwenden Sie bei jeder Blutprobe eine neue sterile Nadel-Lanzette.
- Hände vor der Blutprobe mit warmen Wasser und Seife reinigen und abtrocknen.

Stechhilfe und Gerät vorbereiten

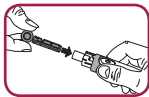

Lanzette einsetzen


Kappe von der Stechhilfe abdrehen. Nadel-Lanzette in die Stechhilfe einlegen. Nadel- Lanzette am Schaft festhalten und Schutzscheibe abdrehen. Schutzscheibe aufbewahren. Kappe auf die Stechhilfe setzen und festdrehen. Kappe drehen, bis Pfeil auf die gewünschte Einstechtiefe zeigt. Spannvorrichtung zurückziehen, bis sie einrastet.



Teststreifen einsetzen

Teststreifen mit den Kontakten voraus in das Messgerät stecken. Über die Sprachausgabe werden Sie zum Blutauftragen aufgefordert. Kurz warten bis nach kurzer Anzeige von „CH“ das blinkende Blutstropfen-Symbol auf dem Display zu sehen ist.

Blutprobe gewinnen

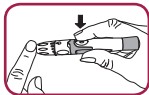

Stechen

Kappe drehen, bis Pfeil auf die gewünschte Einstechtiefe zeigt.

Spannvorrichtung zurückziehen, bis sie einrastet.


Stechhilfe leicht seitlich von der Mitte fest auf der Fingerbeere ansetzen.

Auslöseknopf drücken.

Der gewonnene Blutstropfen muss:

- tropfenförmig sein und darf nicht verschmiert werden
- mindestens 1,2 mm groß sein (Originalgröße ●)

Blut auf Teststreifen auftragen

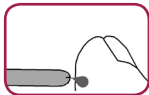

Blutaufnahme-Spalt des Teststreifens an den Blutstropfen halten bis der Spalt vollständig gefüllt ist und ein Piepton zu hören ist. Etwa 6 Sekunden warten bis der gemessene Blutzucker-Wert auf dem Display angezeigt und gleichzeitig angesagt wird.

Normalwert: 2 Stunden nach dem Essen: 70–140 mg/dL
nüchtern: 70–100 mg/dL



Lanzette entsorgen

Kappe abdrehen. Aufbewahrte Schutzscheibe auf eine Fläche legen und mit der Nadelspitze aufspießen. Lanzette abziehen und ordnungsgemäß entsorgen. Kappe aufsetzen und festdrehen.

Kritische Messwerte beurteilen

Lo	Unterzucker < 20 mg/dL	Sofortige Behandlung durch einen Arzt notwendig.
85	Niedriger Blutzucker <70 mg/dL	Zwischenmahlzeit essen. Anweisungen des Arztes befolgen.
150	Hoher Blutzucker nüchtern >100 mg/dL 2 Std. nach dem Essen >140 mg/dL	Arzt aufsuchen.

300	Hoher Blutzucker, ggf. Ketone > 240 mg/dL	Ketontest empfohlen. Dazu Arzt befragen.
H i	Sehr hoher Blutzucker > 600 mg/dL	Mit neuem Teststreifen messen. Bei gleicher Anzeige sofort Arzt aufsuchen.

Meldungen auf dem Display

$E-b$	Leere Batterien	Alle Batterien ersetzen.
$E-F$	Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs	Test mit neuem Streifen wiederholen bei Raumtemperatur +20 °C bis +25 °C.
$E-U$	Gebrauchter oder verunreinigter Teststreifen	Neuen, nicht verfallenen Streifen einlegen und Messung wiederholen.

711.200_GL34_mg-dL_short_0613_D Irrtum und Änderungen vorbehalten