

beurer Reinigungsanleitung IH 50

Hinweis: Aus hygienischen Gründen ist es unbedingt erforderlich den Vernebler sowie das Zubehör nach jeder Behandlung zu reinigen und nach der täglich letzten Behandlung zu desinfizieren.

Zerlegen



1. Ziehen Sie das Mundstück sowie das entsprechende Zubehör vom Vernebler ab.



2. Geben Sie 6 ml klares Wasser in den Medikamentenbehälter und schalten das Gerät ein, um die Mesh vorab von Medikamentenresten zu reinigen (bitte die ganze Flüssigkeit vernebeln).



3. Entfernen Sie die Batterien.



4. Nehmen Sie Ansatzteile wie den Mesh-Vernebler oder den Medikamentenbehälter und die Abdeckung vom Gerät.

Reinigung



5. Der Mesh-Vernebler mit Behälter sowie das benutzte Zubehör wie Mundstück, Maske, Verbindungsstück usw. müssen nach jeder Anwendung mit heißem Wasser gereinigt werden.

Trocknen Sie die Teile sorgfältig mit einem weichen Tuch ab oder führen Sie die Desinfektion durch.

Desinfektion mit kochendem Wasser



6. Der Mesh-Vernebler sollte wie beschrieben zerlegt und zusammen mit dem Mundstück für 15 Minuten in sprudelnd kochendes Wasser gelegt werden. Der Kontakt der Teile mit dem heißen Topfboden sollte hierbei vermieden werden. Die Gesichtsmasken dürfen nicht in heißes Wasser gelegt werden!



7. Sie können den Mesh-Vernebler und das Mundstück auch mit einem handelsüblichen Vaporisator desinfizieren. Beachten Sie hierzu die Gebrauchsanweisung des Vaporisator-Herstellers.



8. Der Mesh-Vernebler darf nicht in die Mikrowelle gelegt werden.




9. Desinfizieren Sie die Masken mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel nach Angaben des Herstellers

Trocknung



10. Trocknen Sie die Teile sorgfältig mit einem weichen Tuch ab.

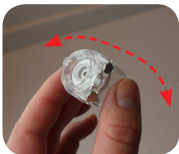

11. Schütteln Sie den Mesh-Vernebler leicht hin und her (5 – 10x), damit das Wasser innerhalb der Mesh aus den kleinen Löchern entfernt wird.



12. Legen Sie die Einzelteile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen Sie sie vollständig trocknen (mindestens 4 Stunden).



13. Setzen Sie die Teile, wenn diese vollständig getrocknet sind, wieder zusammen und legen Sie die Teile in ein trockenes, abgedichtetes Behältnis.