

GL48 mg/dL BLUTZUCKER-MESSGERÄT (Artikelnummer 463.66)



- LEICHT UND EINFACH ZU BEDIENEN
- GROßES DISPLAY
- BELEUCHTETER EINFÜHRSCHLITZ
- ZWEI KNOPFZELLEN CR2032 BEREITS EINGELEGT
- MIT STECHHILFE
- MIT DATENÜBERTRAGUNGSKABEL
- OHNE KODIERUNG (KEINE KALIBRIERUNG)
- BLUTMENGE FÜR DIE MESSUNG: 0,5 µl
- MESSDAUER: ca. 5 SEKUNDEN
- 900 GESPEICHERTE WERTE (MIT DATUM UND UHRZEIT)
- MITTELWERTBERECHNUNG: 7, 14, 30 und 90 TAGE
- ERGEBNISMARKIERUNG
- MESSBEREICH: 20 – 630 mg/dL
- AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG

50 TESTSTREIFEN FÜR GL48/GL49 (Art.-Nr. 463.76)



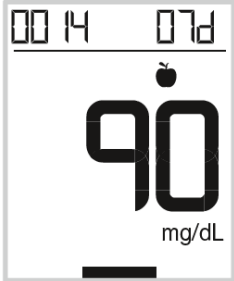
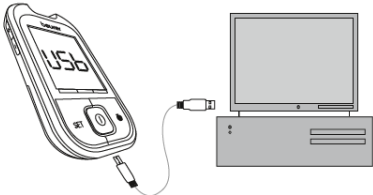


- VERPACKUNG DER TESTSTREIFEN (2 Fläschchen à je 25 Streifen)
- GROBE TESTSTREIFEN MIT PFEIL, FÜR EINFACHES EINFÜHREN
- MINDESTHALTBARKEIT DER OFFENEN VERPACKUNG 24 MONATE
- DIE TESTSTREIFEN KÖNNEN (MIT SAUBEREN HÄNDEN) ÜBERALL BERÜHRT WERDEN UND WERDEN BEIM AUSWURF NICHT BESCHÄDIGT.
- ABWURFTASTE FÜR TESTSTREIFEN

BEURER GL48 BLUTZUCKERMESSGERÄT UND TESTSTREIFEN VERWENDUNG

	<p>INBETRIEBNAHME</p> <p>Die Batterien sind bereits im Messgerät eingelegt. Entfernen Sie den Isolierschutz, indem Sie ihn herausziehen.</p>
	<p>GRUNDEINSTELLUNG</p> <p>Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste (6) ein und drücken Sie die SET-Taste (8). Die Jahresanzeige blinkt. Stellen Sie mit den grünen Seitentasten „+“ und „-“ (9) das Jahr ein und bestätigen Sie mit der SET-Taste (8). Gehen Sie in gleicher Weise vor, um die folgenden Werte einzustellen: Tag – Monat – Stunde – Minuten.</p>
	<p>Fahren Sie fort, um die untere Grenze des normalen Blutzucker-Bereichs (empfohlener Wert 80), die obere Grenze des normalen Blutzucker-Bereichs (empfohlener Wert 180) und die Aktivierung/Deaktivierung des Signaltons (BEEP) einzustellen.</p>
	<p>VORBEREITUNG DES GERÄTS</p> <p>Teststreifen mit den Kontakten nach vorne wie durch den Pfeil angegeben in das Gerät einführen. Das Gerät schaltet sich ein.</p>
	<p>Nach ca. 3 Sekunden wird ein blinkendes Blutstropfensymbol auf dem Bildschirm angezeigt – das Gerät ist messbereit.</p>
	<p>BLUTPROBENENTNAHME</p> <p>Setzen Sie nach dem Wechsel der Stechhilfe die Lanzette auf die Fingerkuppe und drücken Sie den Auslöseknopf. Der Blutstropfen muss mindestens 1,2 mm groß sein. (• richtige Tropfengröße)</p>

	<p>Das Blut darf sich nicht über den Finger verteilen.</p>						
	<p>Legen Sie den Streifen wie abgebildet auf den Blutstropfen, ohne den Streifen vom Gerät zu entfernen. Der Teststreifen saugt automatisch das Blut an, das für die Durchführung des Tests erforderlich ist, und das Gerät gibt ein BEEP ab.</p>						
	<p>VORSICHT! Der Streifen kann nur aus dem Schlitz an der Spitze Blut aufnehmen. Wenn Blut auf oder unter den Teststreifen gelangt, wird der Test nicht korrekt ausgeführt.</p>						
	<p>ERGEBNIS AUSLESEN Der 5-Sekunden-Countdown startet automatisch. Das Ergebnis wird auf dem Display mit Datum, Uhrzeit und einem Balken in den Farben Rot, Grün und Gelb angezeigt.</p> <p>Der Balken ordnet das Ergebnis ein: Balken über Rot = niedriger Blutzuckerwert Balken über Grün = normaler Blutzuckerwert Balken über Gelb = hoher Blutzuckerwert</p>						
 <table border="1" data-bbox="211 1730 630 1843"> <tr> <td></td> <td>Prima del pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dopo il pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).</td> </tr> </table>		Prima del pasto.		Dopo il pasto.		Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).	<p>Ergebnismarkierung (optional) Sie können das Ergebnis durch die „Apfeltaste“ markieren: einmal drücken für „vor dem Essen“; zweimal drücken für „nach dem Essen“; dreimal für allgemeine Markierung; viermal drücken, um die Markierung zu löschen. Diese Markierung ist nicht zwingend erforderlich.</p>
	Prima del pasto.						
	Dopo il pasto.						
	Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).						

	<p>TESTSTREIFENABWURF</p> <p>Verwenden Sie die Taste für einen seitlichen Abwurf, um den Streifen zu entfernen, ohne ihn zu berühren.</p> <p>Gerät schaltet sich automatisch ab.</p>
	<p>MESSWERTSPEICHERUNG</p> <p>Die Messungen werden automatisch mit Datum und Uhrzeit gespeichert (max. 900 Messungen). Zur Anzeige des Speichers: Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste ein und drücken Sie die grünen seitlichen Tasten „+“ oder „-“. Das Tagebuch-Symbol erscheint zwischen Datum und Uhrzeit.</p>
	<p>DURCHSCHNITTSWERTE</p> <p>Sie können den durchschnittlichen Blutzuckerwert der letzten 7, 14, 30 und 90 Tage anzeigen. Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste ein und drücken Sie die „+“-Taste zweimal. Durch Drücken der grünen Tasten „+“ und „-“ können Durchschnittswerte mit und ohne Markierung angezeigt werden.</p>
	<p>MESSWERTÜBERTRAGUNG AN PC ODER APP</p> <p>Schließen Sie das Messgerät mit dem mitgelieferten Kabel an den PC an. Sie können die Daten in Glucomemory, HealthManager und über den HealthManagerPro Uploader in die App auf Ihrem Smartphone übertragen. GL48 überträgt an Smart Digital Clinic und Glooko.</p>

Dokument verfügbar in 

Hier geht's zum Video-Tutorial- link WWW.beurer-medical.it

BEURER MEDICAL KUNDENSERVICE ITALIEN
FÜR TECHNISCHEN SUPPORT
Kostenfreie Kundendienstnummer



- An 365 Tagen im Jahr
- 8.00 – 13:00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr



www.beurer-medical.it



service-it@beurer-medical.de

BESTIMMUNGEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DER VERWENDETEN MATERIALIEN

Teststreifen und Lanzetten nach Gebrauch in einem stichfesten Behälter entsorgen.

Beachten Sie bei der Entsorgung der Teststreifen und Stechhilfen unbedingt die allgemein gültigen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Blut. Entsorgen Sie sorgfältig alle Blutproben und Materialien, mit denen Sie oder Ihre Bewohner in Kontakt gekommen sind, um Verletzungen und Infektionen anderer Personen zu vermeiden. Alle Komponenten des Messgerätes und des Zubehörs können mit menschlichem Blut in Kontakt kommen und stellen somit eine mögliche Infektionsquelle dar.



Verbrauchte, vollkommen entladene Batterien müssen über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgt werden. Die Entsorgung von Batterien ist gesetzlich vorgeschrieben.

Auf schadstoffhaltigen Batterien sind folgende Symbole angebracht:

Pb = Batterie enthält Blei,

Cd = Batterie enthält Cadmium,

Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Im Interesse des Umweltschutzes dürfen Gerät und Verbindungsleitung am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt, sondern müssen über speziell gekennzeichnete Sammelstellen entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Die Stofftasche kann zusammen mit dem Hausmüll oder gemäß den Anweisungen Ihrer Gemeinde entsorgt werden.

