

MEDIDOR de GLUCEMIA GL48 mg/dl (código de artículo 463.66)



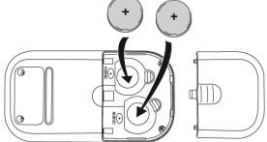
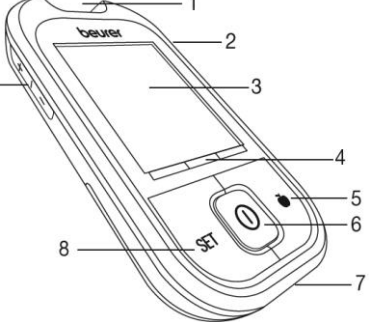


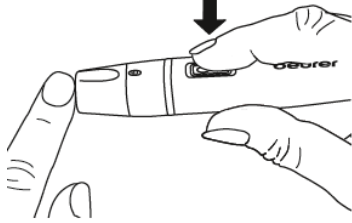
- LIGERO Y FÁCIL DE USAR
- PANTALLA GRANDE
- LUGAR DE INSERCIÓN TIRA ILUMINADA
- DOS PILAS DE BOTÓN CR2032 YA INSERTADAS
- CON PLUMA DE PUNCIÓN DACTILAR
- CON CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS
- SIN CODIFICACIÓN (NINGUNA CALIBRACIÓN)
- CANTIDAD DE SANGRE NECESARIA: 0,5 μ l
- DURACIÓN DE LA MEDICIÓN: aprox. 5 SEGUNDOS
- 900 VALORES ALMACENADOS (CON FECHA y HORA)
- CÁLCULO DE LA MEDIA: 7, 14, 30 y 90 DÍAS
- MARCADO DE LOS RESULTADOS
- INTERVALO DE MEDICIONES: 20–630 mg/dl
- MECANISMO DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

50 TIRAS REACTIVAS PARA GL48/GL49 (código de artículo 463.76)



- PAQUETE DE TIRAS REACTIVAS (2 envases de 25 tiras cada uno)
- TIRA REACTIVA GRANDE CON FLECHA PARA FACILITAR LA INSERCIÓN
- CADUCIDAD DEL PAQUETE ABIERTO 24 MESES
- LA TIRA SE PUEDE TOCAR EN CUALQUIER PARTE (CON LAS MANOS LIMPIAS) SIN QUE SE DAÑE
- BOTÓN DE EXPULSIÓN DE LA TIRA

MEDIDOR DE GLUCEMIA GL48 DE BEURER Y TIRAS REACTIVAS APLICACIÓN DEL PRODUCTO

	<p>PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Las pilas ya están puestas en el aparato. Retire la protección aislante tirando de ella.</p>
	<p>CONFIGURACIÓN BÁSICA Encienda el aparato con el botón de encendido/apagado (6) y pulse el botón SET (8). El indicador del año parpadeará. Configure el año con los botones laterales verdes «+» y «-» (9) y confírmelo con el botón SET (8). Haga lo mismo para la configuración Día – Mes – Hora – Minutos.</p>
	<p>Continúe para configurar el límite inferior del intervalo glucémico normal (valor propuesto de 80), el límite superior del intervalo glucémico normal (valor propuesto de 180) y la activación/desactivación de la alarma acústica (BEEP).</p>
	<p>PREPARACIÓN DEL APARATO Inserte la tira reactiva en el aparato con los contactos hacia delante, tal como indica la flecha. El aparato se encenderá.</p>
	<p>Al cabo de unos 3 segundos, aparecerá en la pantalla el símbolo de una gota de sangre que parpadea. El aparato estará listo para la medición.</p>
	<p>TOMA DE LA MUESTRA DE SANGRE Después de cambiar la lanceta de punción dactilar, apóyela en el lateral de la yema del dedo y pulse el botón de disparo. La gota de sangre deberá tener un tamaño mínimo de 1,2 mm. (• tamaño correcto de la gota)</p>

	<p>La sangre no deberá extenderse por el dedo.</p> <p>Coloque la tira sobre la gota de sangre, como se muestra en la imagen, sin retirar la tira del aparato.</p> <p>La tira absorberá automáticamente la sangre necesaria para la prueba y el aparato emitirá un pitido.</p>						
	<p>Atención! La tira solo puede absorber la sangre por la ranura de la punta. Si se deposita sangre por encima o debajo de la tira, la prueba no se realiza correctamente.</p>						
	<p>LECTURA DEL RESULTADO</p> <p>La cuenta atrás de 5 segundos se inicia automáticamente.</p> <p>El resultado se ve en la pantalla, con la fecha, la hora y una barra correspondiente en rojo, verde y amarillo.</p> <p>La barra ayuda a interpretar el resultado: Barra por encima del rojo = glucemia baja Barra por encima del verde = glucemia normal Barra por encima del amarillo = glucemia alta</p>						
 <table border="1" data-bbox="207 1675 630 1791"> <tr> <td></td> <td>Prima del pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dopo il pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).</td> </tr> </table>		Prima del pasto.		Dopo il pasto.		Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).	<p>Marcado del resultado (opcional)</p> <p>Se puede marcar el resultado mediante el «botón manzana». Pulse una vez para «antes de comer»; dos veces para «después de comer»; tres veces para el marcado general; y cuatro veces para cancelar el marcado. El marcado no es obligatorio.</p>
	Prima del pasto.						
	Dopo il pasto.						
	Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).						

	<p>EXPULSIÓN DE LA TIRA</p> <p>Utilice el botón lateral de expulsión para quitar la tira sin tocarla. El aparato se apaga automáticamente.</p>
	<p>MEMORIA DE LOS VALORES</p> <p>Las mediciones se guardan automáticamente con fecha y hora (máx. 900 mediciones). Para visualizar la memoria: encienda el aparato con el botón de encendido/apagado y pulse los botones laterales verdes «+» o «-». El símbolo del diario aparece entre la fecha y la hora.</p>
	<p>MEDIA DE LOS VALORES</p> <p>Se puede visualizar el valor glucémico medio de los últimos 7, 14, 30 y 90 días. Encienda el aparato con el botón de encendido/apagado y pulse dos veces el botón «+». Pulsando las teclas verdes «+» y «-», se pueden visualizar las medias con y sin marcado.</p>
	<p>TRASMISIÓN DE LOS VALORES AL ORDENADOR Y A LA APLICACIÓN</p> <p>Conecte el glucómetro al ordenador con el cable proporcionado. Se pueden transferir los datos al software Glucomemory y HealthManager y, mediante HealthManagerPro Uploader, a la aplicación de su teléfono inteligente. GL48 transmite a Smart Digital Clinic y Glooko.</p>

Documento disponible en         

Haga clic aquí para ver el tutorial en vídeo- link WWW.beurer-medical.it

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BEURER MEDICAL ITALIA

PARA ASISTENCIA TÉCNICA

Número de teléfono gratuito de atención al cliente



- Disponible los 7 días de la semana, todos los días del año
- De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00



www.beurer-medical.it



service-it@beurer-medical.de

DISPOSICIONES SOBRE LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DESECHADOS



Después del uso, elimine las tiras reactivas y las lancetas en un contenedor resistente.

Durante la eliminación de las tiras reactivas y las lancetas de punción dactilar, siga todas las instrucciones de precaución generalmente válidas para la manipulación de sangre. Elimine con cuidado todas las muestras de sangre y los materiales con los que hayan estado en contacto usted o sus cuidadores para evitar lesiones e infecciones a otras personas. Todos los componentes del medidor y de los accesorios pueden entrar en contacto con sangre humana y, por lo tanto, constituyen una posible fuente de infección.



Elimine las pilas gastadas y completamente descargadas en los puntos de recogida designados, en los puntos de recogida de residuos tóxicos o en las tiendas de electrónica. La eliminación de las pilas es una obligación legal.

Las pilas que contienen sustancias tóxicas están marcadas con los siguientes símbolos:

Pb = pila que contiene plomo,

Cd = pila que contiene cadmio,

Hg = pila que contiene mercurio.

Para proteger el medio ambiente, al final de su ciclo de vida, el aparato y el cable de conexión no deberán tirarse a la basura doméstica, sino que deberán depositarse en los puntos de recogida designados. Elimine el aparato de acuerdo con la Directiva Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En caso de duda, póngase en contacto con las autoridades municipales competentes para la eliminación.

La funda de tela se puede tirar en la basura general o de acuerdo con las instrucciones de su municipio de residencia.

