

LECTEUR DE GLYCÉMIE GL48 mg/dL (référence 463.66)



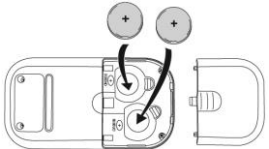
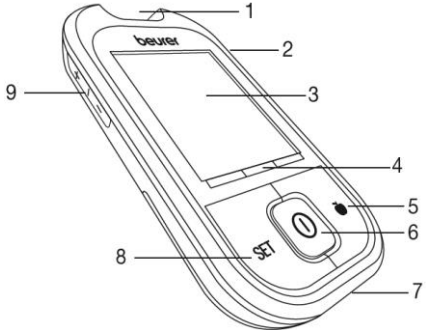
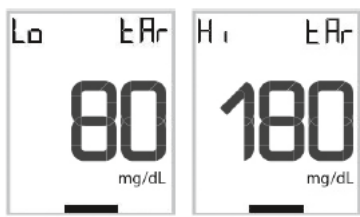
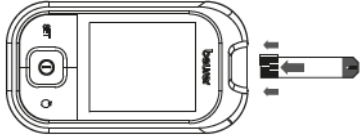

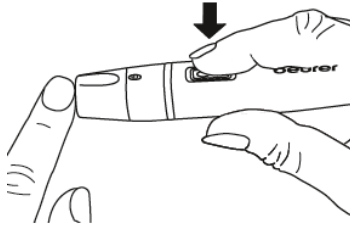
- LÉGER ET SIMPLE D'UTILISATION
- GRAND ÉCRAN
- LOGEMENT POUR LA BANDE DE TEST AVEC ÉCLAIRAGE
- DEUX PILES BOUTONS CR2032 FOURNIES
- AUTOPIQUEUR FOURNI
- CÂBLE DE TRANSMISSION DE DONNÉES FOURNI
- PAS DE CODIFICATION (AUCUN ÉTALONNAGE)
- QUANTITÉ DE SANG REQUISE : 0,5 µl
- DURÉE DE LA MESURE : env. 5 SECONDES
- 900 VALEURS ENREGISTRÉES (AVEC DATE et HEURE)
- CALCUL DE LA MOYENNE : 7, 14, 30 et 90 JOURS
- NOTATION DES RÉSULTATS
- PLAGE DE MESURE : 20 – 630 mg/dL
- ARRÊT AUTOMATIQUE

50 BANDES DE TEST POUR GL48/GL49 (référence 463.76)


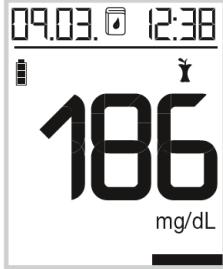
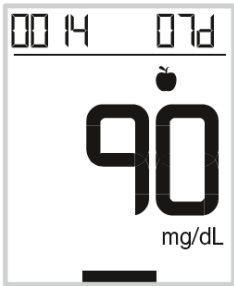
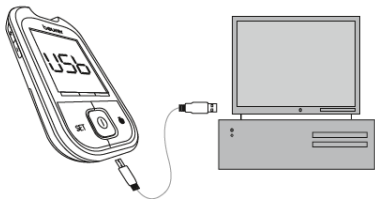


- PACK DE BANDES DE TEST (2 flacons contenant 25 bandes chacun)
- LARGE BANDE DE TEST AVEC FLÈCHE POUR UNE INSERTION FACILE
- DURÉE DE CONSERVATION DE L'EMBALLAGE APRÈS OUVERTURE : 24 MOIS
- LA BANDE PEUT ÊTRE MANIPULÉE SUR TOUTE SA SURFACE (AVEC DES MAINS PROPRES) SANS ÊTRE ENDOMMAGÉE BOUTON D'ÉJECTION DE LA BANDE DE TEST
- BOUTON D'ÉJECTION DE LA BANDE DE TEST

LECTEUR DE GLYCÉMIE BEURER GL48 ET BANDES DE TEST UTILISATION DU PRODUIT

	<p>MISE EN SERVICE Les piles sont déjà insérées dans l'appareil. Tirez pour enlever la protection isolante.</p>
	<p>RÉGLAGES DE BASE Allumez l'appareil à l'aide de la touche marche/arrêt (6) et appuyez ensuite sur la touche SET (8). L'affichage de l'année clignote. Réglez l'année à l'aide des touches latérales vertes « + » et « - » (9) et confirmez par une pression sur la touche SET (8). Procédez de même pour le réglage du jour, du mois, de l'heure et des minutes.</p>
	<p>Définissez la limite inférieure de votre plage glycémique cible (valeur proposée : 80), la limite supérieure cible (valeur proposée : 180) et choisissez d'activer ou de désactiver le signal sonore (BEEP).</p>
	<p>PRÉPARATION DE L'APPAREIL Introduisez la bande de test dans l'appareil en présentant les contacts vers l'avant, comme indiqué par la flèche. L'appareil s'allume.</p>
	<p>Après environ 3 secondes, le symbole clignotant figurant une goutte de sang apparaît à l'écran : l'appareil est prêt pour la mesure.</p>
	<p>PRÉLÈVEMENT D'UN ÉCHANTILLON DE SANG Après avoir changé la lancette, placez-la sur le côté du doigt et appuyez sur le bouton de déclenchement. La taille minimale de la goutte de sang doit être de 1,2 mm (taille correcte de la goutte : •)</p>

	<p>Le sang ne doit pas se répandre sur le doigt.</p>						
	<p>Placez la bande de test sur la goutte de sang comme indiqué sur l'image sans retirer la bande de l'appareil.</p> <p>La bande absorbe automatiquement le sang nécessaire pour effectuer le test et l'appareil émet un signal sonore (BEEP).</p>						
	<p>Attention ! La bande ne peut absorber le sang que depuis la fente située à l'extrémité. Si le sang est placé sur ou sous la bande, le test ne pourra pas être correctement effectué.</p>						
	<p>LECTURE DU RÉSULTAT</p> <p>Le compte à rebours de 5 secondes démarre automatiquement.</p> <p>Le résultat est affiché sur l'écran avec la date, l'heure et une barre de couleur rouge, verte ou jaune.</p> <p>La barre facilite l'interprétation du résultat :</p> <p>Barre dans la zone rouge = glycémie faible Barre dans la zone verte = glycémie normale Barre dans la zone jaune = glycémie élevée</p>						
 <table border="1" data-bbox="207 1661 630 1780"> <tr> <td></td> <td>Prima del pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dopo il pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).</td> </tr> </table>		Prima del pasto.		Dopo il pasto.		Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).	<p>Marquage du résultat (facultatif)</p> <p>Vous pouvez marquer le résultat à l'aide de la touche symbolisée par une pomme :</p> <p>appuyez une fois pour signaler que la mesure a été prise « avant le repas », deux fois si c'est « après le repas », 3 fois pour un marquage général et 4 fois pour effacer le marquage. Le marquage n'est pas obligatoire.</p>
	Prima del pasto.						
	Dopo il pasto.						
	Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).						

	<p>ÉJECTION DE LA BANDE DE TEST</p> <p>Utilisez la touche d'éjection située sur le côté de l'appareil pour retirer la bande de test sans la toucher.</p> <p>L'appareil s'éteint automatiquement.</p>
	<p>MÉMOIRE DES VALEURS</p> <p>Les mesures sont automatiquement enregistrées avec la date et l'heure (900 mesures maximum). Pour consulter les mesures en mémoire : allumez l'appareil à l'aide de la touche marche/arrêt et appuyez ensuite sur les touches vertes « + » ou « - » situées sur le côté de l'appareil. Le symbole en forme de journal s'affiche entre la date et l'heure.</p>
	<p>MOYENNE DES VALEURS</p> <p>Vous pouvez consulter la valeur moyenne de vos mesures de glycémie au cours des 7, 14, 30 et 90 derniers jours. Allumez l'appareil à l'aide de la touche marche/arrêt, puis appuyez deux fois sur la touche « + ». À l'aide des touches vertes « + » et « - », vous pouvez afficher les moyennes avec et sans marquage.</p>
	<p>TRANSFERT DES VALEURS MESURÉES VERS UN ORDINATEUR ET UNE APPLICATION</p> <p>Connectez le lecteur de glycémie à l'ordinateur avec le câble fourni. Vous pouvez transférer des données à l'aide des logiciels Glucomemory, HealthManager et HealthManagerPro Uploader vers l'application préalablement installée sur</p>

vosre smartphone. L'appareil GL48 est compatible avec les solutions Smart Digital Clinic et Glooko.

Document disponible en         

Cliquer ici pour suivre le tutoriel vidéo- link WWW.beurer-medical.it

SERVICE CLIENT BEURER MEDICAL ITALIE
POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Numéro vert du service client

Numero Verde
800 - 700 806

- Disponible 7 jours sur 7, tous les jours de l'année
- De 8 h à 13 h et de 14 h à 18 h



www.beurer-medical.it



service-it@beurer-medical.de

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION APPROPRIÉE DES MATIÈRES MISES AU REBUT

Après utilisation, éliminez les bandes de test et les lancettes dans un récipient résistant à la perforation.

Lors de l'élimination des bandes de test et des lancettes, respectez impérativement les mesures de précaution généralement applicables en matière de manipulation du sang. Tous les échantillons sanguins et le matériel avec lequel vous ou vos soignants êtes entrés en contact doivent être soigneusement éliminés, afin d'éviter toute blessure ou infection



de tiers. Tous les composants de l'appareil de mesure et ses accessoires peuvent entrer en contact avec du sang humain. Ils constituent, par conséquent, une source possible d'infection.

Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou déposées dans des points de collecte réservés à cet usage ou chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale.

Les piles contenant des substances toxiques affichent les symboles suivants :

Pb = pile contenant du plomb,

Cd = pile contenant du cadmium,

Hg = pile contenant du mercure.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil et son câble de raccordement ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur cycle de vie.

Leur élimination doit se faire dans des points de collecte adaptés. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

La pochette en tissu peut être éliminée avec les déchets généraux ou selon les indications de votre lieu de résidence.

