

APARAT DE MĂSURARE A GLICEMIEI GL48 mg/dL (cod articol 463.66)



- UȘOR ȘI SIMPLU DE UTILIZAT
- AFIȘAJ AMPLU
- FANTĂ ILUMINATĂ PENTRU INTRODUCEREA BENZII
- DOUĂ BATERII DE TIP PASTILĂ CR2032 DEJA INTRODUSE
- CU DISPOZITIV DE ÎNȚEPARE
- CU CABLU PENTRU TRANSMITEREA DATELOR
- FĂRĂ CODIFICARE (NU NECESITĂ CALIBRARE)
- CANTITATEA de SÂNGE NECESARĂ: 0,5 μ l
- TIMP DE MĂSURARE: aprox. 5 SECUNDE
- 900 DE VALORI STOCATE (CU DATA ȘI ORA)
- CALCULAREA VALORII MEDII: 7, 14, 30 și 90 ZILE
- MARCAREA REZULTATELOR
- INTERVALUL DE MĂSURARE: 20 – 630 mg/dL
- OPRIRE AUTOMATĂ

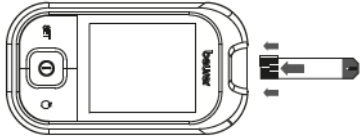
50 DE BENZI DE TEST PENTRU GL48/GL49 (cod articol 463.76)







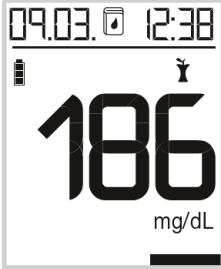
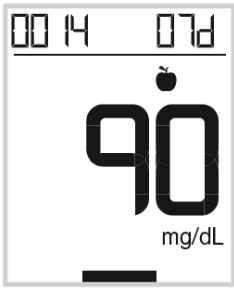
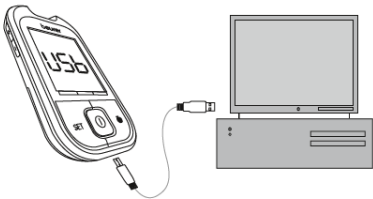
- PACHET DE BENZI DE TEST (2 flacoane de câte 25 de benzi)
- BANDĂ DE TEST MARE CU SĂGEATĂ PENTRU FACILITAREA INTRODUCERII
- DURATĂ DE VALABILITATE: 24 DE LUNI DE LA DESCHIDEREA AMBALAJULUI
- BANDA POATE FI ATINSĂ ORIUNDE (CU MÂINILE CURATE) FĂRĂ A FI DETERIORATĂ ÎN MOMENTUL EJECTĂRII
- TASTĂ PENTRU EJECTAREA BENZII

APARAT DE MĂSURARE A GLICEMIEI BEURER GL48 ȘI BENZI DE TEST

UTILIZAREA PRODUSULUI

	<p>PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE Bateriile sunt deja introduse în aparat. Trageți de protecția izolatoare pentru a o înlătura.</p>
	<p>SETĂRI DE BAZĂ Porniți aparatul folosind tasta de pornire/oprire (6) și apăsați tasta SET (SETARE) (8). Indicația anului apare intermitent; setați anul cu tastele laterale verzi „+” și „-” (9) și confirmați cu tasta SET (8). Procedați în același mod pentru a seta ziua – luna – orele – minutele.</p>
	<p>Continuați cu setarea limitei inferioare a intervalului glicemic normal (valoare sugerată 80), a limitei superioare a intervalului glicemic normal (valoare sugerată 180) și a activării /dezactivării semnalului sonor (bip).</p>
	<p>PREGĂTIREA APARATULUI Introduceți în aparat banda de test, cu contactele în față, așa cum indică săgeata. Aparatul pornește.</p>
	<p>După aproximativ 3 secunde, pe ecran se afișează intermitent simbolul unei picături de sânge: aparatul este pregătit pentru măsurare.</p>
	<p>RECOLTAREA PROBEI DE SÂNGE După ce ați schimbat lanțeta de înțepare, puneți-o pe partea laterală a vârfului degetului și apăsați butonul de eliberare. Picătura de sânge trebuie să aibă o dimensiune de cel puțin 1,2 mm (• dimensiunea corectă a picăturii) Sângele nu trebuie să se prelingă pe deget.</p>

	<p>Aplicați banda pe picătura de sânge, așa cum se indică în imagine, fără a scoate banda din aparat.</p> <p>Banda absoarbe automat sângele necesar pentru efectuarea testului, iar aparatul emite un semnal sonor.</p>						
	<p>Atenție! Banda poate absorbi sânge numai prin canalul din vârf. Dacă sângele este plasat deasupra benzii sau sub aceasta, testul nu va fi efectuat în mod corect.</p>						
	<p>CITIREA REZULTATULUI</p> <p>Numărătoarea inversă de 5 secunde pornește automat.</p> <p>Rezultatul apare pe afișaj cu data, ora și o bară în dreptul segmentelor de culoare roșie, verde și galbenă</p> <p>Bara ajută la interpretarea rezultatului: Bară deasupra segmentului de culoare roșie = glicemie scăzută</p> <p>Bară deasupra segmentului de culoare verde = glicemie normală</p> <p>Bară deasupra segmentului de culoare galbenă = glicemie ridicată</p>						
 <table border="1" data-bbox="207 1671 630 1787"> <tr> <td></td> <td>Prima del pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dopo il pasto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).</td> </tr> </table>		Prima del pasto.		Dopo il pasto.		Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).	<p>Marcarea rezultatului (opțional)</p> <p>Puteți marca rezultatul cu ajutorul „tastei măr”: apăsați o dată pentru „înainte de masă”, de două ori pentru „după masă”, de 3 ori pentru marcarea generală și de 4 ori pentru a anula marcarea. Marcarea nu este obligatorie.</p>
	Prima del pasto.						
	Dopo il pasto.						
	Marcatura generale (ad es. dopo sforzo fisico).						

	<p>EJECTAREA BENZII</p> <p>Utilizați tasta laterală de ejectare pentru a scoate banda fără a o atinge. Aparatul se oprește automat.</p>
	<p>MEMORAREA VALORILOR</p> <p>Măsurătorile sunt salvate automat cu data și ora (max. 900 de măsurători). Pentru a afișa valorile din memorie: porniți aparatul cu tasta de pornire/oprire și apăsați tastele verzi laterale „+” sau „-”. Între dată și oră se afișează simbolul jurnalului.</p>
	<p>MEDIA VALORILOR</p> <p>Se poate afișa valoarea medie a glicemiei din ultimele 7, 14, 30 și 90 de zile. Porniți aparatul folosind tasta de pornire/oprire și apăsați de două ori tasta „+”. Apăsați tastele verzi „+” și „-” pentru a afișa valorile medii cu marcaj sau fără marcaj.</p>
	<p>TRANSMITEREA VALORILOR LA COMPUTER ȘI APP</p> <p>Conectați glucometrul la PC cu ajutorul cablului furnizat. Puteți transfera datele la aplicația de pe smartphone folosind software-urile Glucomemory, HealthManager și HealthManagerPro Uploader. GL48 transmite la Smart Digital Clinic și Glooko.</p>

Document disponibil în         

Faceți clic aici pentru a urmări video-ul demonstrativ- link

WWW.beurer-medical.it

**SERVICIUL PENTRU CLIENȚI BEURER MEDICAL ITALIA
PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ**

Număr gratuit al serviciului pentru clienți



- Disponibil non-stop, pe toată durata anului
- Între orele 08:00 și 13:00 și între orele 14:00 și 18:00



www.beurer-medical.it



service-it@beurer-medical.de

PREVEDERI PRIVIND ELIMINAREA CORESPUNZĂTOARE A MATERIALELOR UZATE

După utilizare, aruncați benzile de test și lanțetele într-un recipient rezistent.

Pentru eliminarea benzilor de test și a lanțetelor, respectați cu strictețe măsurile de precauție generale în vigoare cu privire la manevrarea sângelui. Eliminați cu atenție toate probele de sânge și materialele cu care dvs. sau pacienții dvs. ați/au intrat în contact, pentru a preveni vătămarea și infectarea altor persoane. Toate componentele aparatului de măsurare și ale accesoriilor acestuia pot intra în contact cu sângele uman și prin urmare pot constitui o sursă de infecție.



Eliminați bateriile uzate și complet descărcate la centrele de colectare specializate, la centrele de colectare a deșeurilor toxice sau la magazinele de electronice. Eliminarea bateriilor este o cerință legală.

Bateriile care conțin substanțe toxice sunt marcate cu următoarele simboluri:

Pb = baterie care conține plumb,

Cd = baterie care conține cadmiu,

Hg = baterie care conține mercur.

Pentru a proteja mediul, la sfârșitul ciclului său de viață, aparatul și cablul de conectare nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predate la centrele de colectare specializate. Eliminați acest aparat în conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). În caz de nelămuriri, contactați autoritățile locale competente pentru eliminarea deșeurilor. Husa din material textil poate fi eliminată împreună cu deșeurile generale sau conform instrucțiunilor autorităților locale

